

# cobas<sup>®</sup>

*Life needs answers*



## Accutrend Plus

**Ponúka presné a rýchle stanovenie:  
krvný cukor, cholesterol, triglyceridy a laktát**

Prístroj Accutrend Plus predstavuje rýchly a účinný spôsob zisťovania rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb a prináša okamžité výsledky. Pravidelným sledovaním týchto parametrov možno získať dôležité informácie o priebehu chorôb.

A práve k tomu je určený prístroj Accutrend Plus. Umožňuje meranie kľúčových parametrov kardiovaskulárnych chorôb kedykoľvek a kdekoľvek. A navyše je bezpečný, spoľahlivý a ľahko ovládateľný.



## TRI JEDNODUCHÉ KROKY, PRESNÉ VÝSLEDKY

### 1. krok:

Zapnite prístroj a vložte testovací prúžok. Blikajúca šípka na displeji naznačuje, aby ste prístroj otvorili a naniesli vzorku krvi.



### 2. krok:

Pomocou odberovej lancety (ihličky) uskutočnite vpich do končeka prsta a naneste vzorku kapilárnej krvi priamo na testovací prúžok.



### 3. krok:

Zavrite prístroj a počkajte na výsledky, ktoré sa po dokončení merania zobrazia na displeji. Hodnoty mimo definovaný rozsah budú označené ako *H* alebo *LO*.



## ACCUTREND PLUS TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Krvný cukor	1,1–33,3 mmol/l
Cholesterol	3,88–7,76 mmol/l
Triglyceridy	0,80–6,86 mmol/l
Laktát	0,80–21,7 mmol/l
Typ vzorky	Čerstvá kapilárna krv
Objem vzorky	15 - 40 A (podľa meraného parametra)
Pamäť	100 nameraných výsledkov pre každý testovací parameter
Prevádzka na batérie	4 alkalické mangánové batérie AAA, 1,5V
Rozmery / hmotnosť	154 x 81 x 30 mm / Cca 140 g
Prevádzkové podmienky	18 - 32 °C (pre laktát: 5-35 °C)
Doba merania	12 s (krvný cukor), 180 s (cholesterol) 174 s (triglyceridy), 60s (laktát)

ACCUTREND, COBAS a LIFE NEEDS ANSWERS

sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Roche.

© 2009 Roche

Distribúcia pre SR:

INTES POPRAD s.r.o. • Námestie Svätého Egídia 95, 058 01 Poprad

tel. č.: +421 52 7871 305 alebo 7871 319, [www.intespp.sk](http://www.intespp.sk)